



Kurzanleitung zum Transfer mit dem trivida®- Rad

1. Sicherstellen, dass eines der Segmente nach oben schaut
2. Beide Bremsen anziehen (gegebenenfalls Bremse auf Seite des Transfers abklappen, wenn möglich), Armlehne hochklappen, auf Seite des Transfers



3. Hebel des Segments lösen



4. Oberstes Segment herausnehmen



5. Segment auf der gegenüberliegenden Seite einhängen



6. Rutschbrett anlegen und rüber rutschen

